

Lamiken-R

ディスポーザブル子宮頸管拡張器

ラミケンアール

ディスポーザブル子宮頸管拡張器・ラミケンアールは

術前の迅速な対応を容易にするため、あらゆる高度な要望に対応し、コストパフォーマンスにも優れた製品を完成させました。

より多くの方々へディスポーザブル子宮頸管拡張器・ラミケンアールの安心と信頼をお約束します。

ディスポーザブル子宮頸管拡張器・ラミケンアール

ラミケンアールは高分子材料から創り上げた機能的なディスポーザブル子宮頸管拡張器です。子宮頸管を損傷することなく子宮頸管の緩やかな拡張をスムーズに行うことができます。数多くの産婦人科ドクターからの御要望により適度な湾曲を保持したまま製品化しました。


Lamiken-R

特長

- 頸管にスムーズに挿入できるよう、挿入部に予め適度な湾曲をつけています。
- しっかり把持できるように把持部分には滑り防止溝を採用しています。
- 頸管からの分泌液を吸収し緩やかに膨張するため、拡張時に裂傷の危険性が少なく、患者の苦痛がほとんどありません。
- 先端部は膨張しない(水分を吸収しない)処理を施しています。
- 強度に優れ破損の危険性が少なく、抜去もスムーズで確実です。
- 本製品には薬品などは一切使用しておりません。




カタログ No.	サイズ		入 数
	幅	長さ	
KL-30	3mm	75mm	10本/箱
KL-50	5mm	75mm	10本/箱

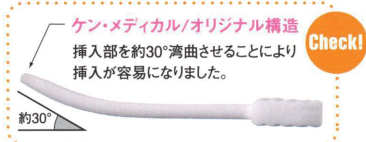

挿入・抜去時の注意事項

- 本製品は滅菌済みディスポーザブル製品につき再使用は出来ません。
- 抜去の際はヒモを引っ張らず、ピンセット・鉗子などで摘み出して下さい。
- 挿入時に本製品に滅菌水などをかけないで下さい。(水分を含むと膨張し挿入できないことがあります)
- 留置時間は24時間以内として下さい。
- 留置時に何らかの異常が発生した場合直ちに使用を停止して下さい。
- 月経時には使用しないで下さい。

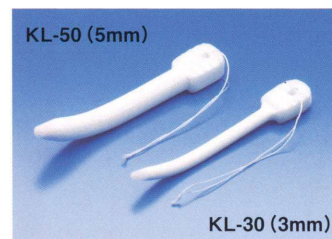

留置時の膨張データ

留置時間(h)	膨張後の幅	
	KL-30	KL-50
1~4	11mm	13mm
5~24	12mm	14mm

※製造元独自のデータによる

※本製品はディスポーザブル製品につき再滅菌・再使用はしないで下さい。
※仕様・形状・価格については、改良等の理由により予告なく変更することがあります。

一般名称:子宮頸管拡張器 クラス分類:一般医療機器(クラスI) 届出番号:28B3X10038000003

製造販売元
ケン・メディカル株式会社

本 社: 〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目22番18号
TEL 06(4962)5060 (代表) FAX 06(4962)5070

東京営業所: 〒113-0034 東京都文京区湯島4丁目5番7号 目黒ビル
TEL 03(3818)6621 (代表) FAX 03(3818)6595

取扱代理店